

HU



SÍKOSÍTÓ PROTÉZISHEZ

70% ETILALKOHOL TARTALMÚ

RENDELTETÉS

A szilikon vagy gél csonktokok kenésére azok behelyezésekor.



15 fl. oz. (443 ml)

REF PA604

MD Orvostechnikai eszköz



A termék megfelel az 2017/745/EU Rendeletben az orvostechnikai eszközökkel szemben előírt követelményeknek. A rendelet VIII. mellékletében meghatározott osztályozási szabályok értelmében a termék I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.

Az ALPS síkosító szilikon vagy zselé belső csonktok protézis viseléshez a megfelelő termék. Megszünteti a súrlódást és lehetővé teszi a belső csonktok feltekerését, mely által annak felvétele könnyebbé válik.

HASZNÁLATA:

Fordítsa ki a belső csonktokot és spriccelje a síkosítót annak külső felületére (mely a kifordítással belülré kerül). Görgesse a belső csonktokot a csonkra.



Elővigyázatossági intézkedések

Alkoholt tartalmaz. Győződjön meg róla, hogy a csonk bőre és a belső csonktok között ne maradjon termék maradvány: ez esetlegesen irritációt okozhat. Kizárólag külsőleges használatra! Gyermekektől távol tartandó! FIGYELEM! GYÚLÉKONY! TÚZTÓL VAGY NYÍLT LÁNGTÓL TÁVOL TARTANDÓ!

Súlyos váratlan események bejelentése. Abban a valószínűtlen helyzetben, ha az eszközzel kapcsolatban súlyos váratlan esemény következne be, úgy azt be kell jelentenie a gyártó vagy a kompetens nemzeti hatóság felé.



ÖSSZETÉTELE:

Etilalkohol, víz, dimetikon kopoliol

GYÁRTÓ

ALPS South LLC
2895 42nd Ave. N.
St. Petersburg,
FL. 33714, USA
Tel: 1-727-528-8566
Fax: 1-727-528-8862
Info@easyliner.com
www.easyliner.com

MEGHATALMAZOTT

KÉPVISELŐ
CEpartner4U
Esdoornlaan 13,
3951DB Maarn,
Hollandia
www.cepartner4u.com

4218 02512 3K3.C
2021 október

IMPORTŐR

ALPS SOUTH EUROPE s.r.o.
Božkovské náměstí 17/21
32600 Plzeň
Cseh Köztársaság
Tel: +420 377 223 127
Fax: +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu