

HU



MOSÓSZER PROTÉZISHEZ

ÉRZÉKENY BŐRRE PH SEMLEGES

Szappan és színezőanyag
mentes

RENDELTTETÉS

A protézis interfészek és az érzékeny bőr tisztításához.



ALPS
16 fl. oz. (473 ml)

REF PD595

MD Orvostechnikai eszköz



A termék megfelel az 2017/745/EU Rendeletben az orvostechnikai eszközökkel szemben előírt követelményeknek. A rendelet VIII. mellékletében meghatározott osztályozási szabályok értelmében a termék I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.

MOSÓSZER PROTÉZISHEZ

REF PD595

Az ALPS mosószer protézis belső csontok és térdvédők kézi mosásához ideális nem lúgos, szappanmentes mosószer. A protézissel közvetlenül érintkező bőrfelületet kíméletesen tisztítja.

HASZNÁLATA:

Kézzel mosható: Fordítsa a belső csontokat, vagy a térdvédőt balra, tegyen rá egy kis mosószert, majd súrolás nélkül alaposan öblítse le. Jól szellőző helyen hagyja megszáradni.



Elővigyázatossági intézkedések

Kizárólag külsőleges használatra! Kerülje a termék szembe kerülését! Szembekerülés esetén vízzel öblögesse! Ne használja nyílt seben vagy gyulladt bőrfelületen!. Irritáció esetén hagyja abba a termék használatát!

Súlyos váratlan események bejelentése. Abban a valószínűtlen helyzetben, ha az eszközzel kapcsolatban súlyos váratlan esemény következne be, úgy azt be kell jelentenie a gyártó vagy a kompetens nemzeti hatóság felé.

ÖSSZETÉTELE:

Víz, Ammoniumlaurylsulfat, Ammonium Laureth (4) Sulfat, Cocamidopropylamin-oxid, Cocamidopropylamin Betain, Nonoxinol-10.

GYÁRTÓ

ALPS South LLC
2895 42nd Ave. N.
St. Petersburg,
FL 33714, USA
Tel: 1-727-528-8566
Fax: 1-727-528-8862
Info@easyliner.com
www.easyliner.com

MEGHATALMAZOTT

KÉPVISELŐ
CEpartner4U
Esdoornlaan 13,
3951DB Maarn,
Hollandia
www.cepartner4u.com

IMPORTŐR

ALPS SOUTH EUROPE s.r.o.
Božkovské náměstí 17/21
32600 Plzeň
Cseh Köztársaság
Tel: +420 377 223 127
Fax: +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu

4216 02214 3K3.D
2021 október