

Válasz

Javasoljuk, hogy csonktok felvétele előtt a csonkot kenje ALPS (SL108) testápolóval. A testápolót arra a területre vigye fel, ahol a csonk és a szilikon között relatív mozgás várható, mint például a sarok, a térd ínszalagjainak bemenete, és esetenként a proximális szegély.

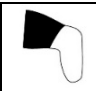



Garancia

A Silicone Pro belső csonktokok gyártási hibájára 12 hónapos garancia vonatkozik.

Figyelmeztetés: a vágásból, lukadásból, sérülésből eredő szakadások, karcolások, a nem megfelelő tok bevonatból származó kopásokra a garancia nem vonatkozik.

A visszáru engedélyezéséhez vegye fel a kapcsolatot az Alps Vevőszolgálattal 9-13 és 14-18 óra között és adja meg a következő adatokat: Cégnév, számla száma és dátuma, termék gyártási szám, visszáru oka

A cég által adott visszáru engedély számot a feladott csomagon fel kell tüntetni.

A használt szimbólumok jegyzéke			
Belső csonktok		Orvostechnikai eszköz	
Gyártó		Többszöri felhasználás/páciens	

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 2017/745/EU Rendeletben az orvostechnikai eszközökkel szemben előírt követelményeknek. A rendelet VIII. mellékletében meghatározott osztályozási szabályok értelmében a termék I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.

Súlyos váratlan események bejelentése

Abban a valószínűtlen helyzetben, ha az eszközzel kapcsolatban súlyos váratlan esemény következne be, úgy azt be kell jelentenie a gyártó vagy a kompetens nemzeti hatóság felé.



GYÁRTÓ
ALPS South LLC
2895 42nd Ave. N.
St. Petersburg, FL. 33714, USA
Tel: 1-727-528-8566
Fax: 1-727-528-8862
info@easyliner.com
www.easyliner.com

MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ
CEpartner4U
Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn,
Hollandia
www.cepartner4u.com

IMPORTŐR
ALPS SOUTH EUROPE s.r.o.
Božkovské náměstí 17/21 - 32600
Plzeň - Cseh Köztársaság
Tel: +420 377 223 127
Fax: +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu

5063 02671 3K3.D
JÚNIUS 2023

TERMÉK ÚTMUTATÓ

HU



Szilikon linerek

Rendeltetés

Az ALPS szilikon linerek rendeltetészerűen alsó végtagi külső lábprotézis részeként használhatók; a megmaradt csonkon kell viselni kipárnázás és védelem érdekében. Az Alps szilikon linerek szövettel ellátott, orvosi minőségű szilikon linerek, amelyek zárható vagy párnás függesztéssel érhetőek el. A zárható változat disztálisan illeszthető a csap felhelyezéséhez, és zárórendszerrel együtt használatos, amivel a lábprotézis felfüggeszthető.

Korlátozások és ellenjavallatok

Ne viselje sérült bőrön vagy nyílt seben! Mielőtt felvenné a csonktokot, gondoskodjon az érintett terület megfelelő eszközzel való védelméről!

Felhasználási körülmények

Ne viselje sérült bőrön vagy nyílt seben! Mielőtt felvenné a csonktokot, gondoskodjon az érintett terület megfelelő eszközzel való védelméről!

Elővigyázatossági intézkedések

Bőrkiütések és irritációk

Az ALPS szilikon linerekhez használt anyagok bőrbarátok és latexmentesek. A bőr irritáció megelőzése érdekében fontos, hogy a végtagcsonkot és a csonktokot naponta tisztítsa. Miután lemosta a végtagcsonkot, öblítse le annak felületét, hogy az irritációt és bőrkiütést okozó esetleges mosószer maradványokat eltávolítsa. Győződjön meg róla, hogy a végtag teljesen száraz, mielőtt a protézist felvenné!

Lásd a „végtagcsonk tisztítása” és a „csonktok tárolása” részeket!

Irritáció és bőrkiütések megjelenése esetén hagyja abba az eszköz használatát és forduljon szakképzett ortopéd technikushoz!

Az anyag minőségének romlása

Használaton kívül a csontokat közvetlen hőforrástól távol, hűvös helyen tárolja!

A termék hosszú ideig való laposan tárolása repedések kialakulásához vezethet. Használaton kívül a csontok belsejébe mindig helyezze be a szivacs bélést!

A termék épsége

Hagyja abba a csontok használatát, ha az anyagon repedések, szakadások, károsodás jeleit tapasztalja és forduljon szakképzett ortopéd technikushoz!

A csontok viselése

Szüntesse meg a végtagcsont és a csontok között a légbuborékokat, mert azok viselés közben fájdalmat okozhatnak!

Abban az esetben, ha disztális rögzítésű (csapos) csontokat használ, úgy ellenőrizze, hogy a csap megfelelő irányban áll-e! Mielőtt járni kezdene a végtag protézissel, győződjön meg róla, hogy a csap biztosan rögzül a rögzítőrendszerhez!

Lásd a „csontok viselése” részeket!

Méretek

Mérje le a csont körfogatát annak disztális csúcsától 6 cm-re.

A javasolt mérethez lásd a következő táblázatot!

A méreteket a disztális csúcstól 6 cm-re mértük.

Silicone Pro Liner

Mért méret	Zárható 3 mm	Párnás 3 mm egységesen
20-22cm	LSL3.0-20	LSC3.0-20
22-24cm	LSL3.0-22	LSC3.0-22
24-26cm	LSL3.0-24	LSC3.0-24
26-28cm	LSL3.0-26	LSC3.0-26
28-30cm	LSL3.08	LSC3.0-28
30-32cm	LSL3.0-30	LSC3.0-30
32-35cm	LSL3.0-32	LSC3.0-32
35-38cm	LSL3.0-35	LSC3.0-35
38-41cm	LSL3.0-38	LSC3.0-38
41-44cm	LSL3.0-41	LSC3.0-41
44-47cm	LSL3.0-44	LSC3.0-44

SoftSil Liner

Mért méret	Zárható szürke	Párnás szürke	Zárható bézs	Párnás bézs	Zárható barna	Párnás barna
20-22cm	SSGSL-20	SSGSC-20	PL-SSBGSL-20	PL-SSBGSC-20	PL-SSBNSL-20	PL-SSBNSC-20
22-24cm	SSGSL-22	SSGSC-22	PL-SSBGSL-22	PL-SSBGSC-22	PL-SSBNSL-22	PL-SSBNSC-22
24-26cm	SSGSL-24	SSGSC-24	PL-SSBGSL-24	PL-SSBGSC-24	PL-SSBNSL-24	PL-SSBNSC-24
26-28cm	SSGSL-26	SSGSC-26	PL-SSBGSL-26	PL-SSBGSC-26	PL-SSBNSL-26	PL-SSBNSC-26
28-30cm	SSGSL-28	SSGSC-28	PL-SSBGSL-28	PL-SSBGSC-28	PL-SSBNSL-28	PL-SSBNSC-28
30-32cm	SSGSL-30	SSGSC-30	PL-SSBGSL-30	PL-SSBGSC-30	PL-SSBNSL-30	PL-SSBNSC-30
32-35cm	SSGSL-32	SSGSC-32	PL-SSBGSL-32	PL-SSBGSC-32	PL-SSBNSL-32	PL-SSBNSC-32
35-38cm	SSGSL-35	SSGSC-35	PL-SSBGSL-35	PL-SSBGSC-35	PL-SSBNSL-35	PL-SSBNSC-35
38-41cm	SSGSL-38	SSGSC-38	PL-SSBGSL-38	PL-SSBGSC-38	PL-SSBNSL-38	PL-SSBNSC-38
41-44cm	SSGSL-41	SSGSC-41	PL-SSBGSL-41	PL-SSBGSC-41	PL-SSBNSL-41	PL-SSBNSC-41
44-47cm	SSGSL-44	SSGSC-44	PL-SSBGSL-44	PL-SSBGSC-44	PL-SSBNSL-44	PL-SSBNSC-44

A belső csontok használata

Minthogy nem szükséges a csontokra bármilyen típusú kenőanyagot felvinni, ennek ellenére tehet rá egy kevés Alps szilikonos bőrpoló krémet (SL108).

A belső csontokat felhúzhatja, vagy kifordíthatja és feltekerheti, illetve belebújhat, mint egy zokniba. Szüntessen meg minden, a csont és a hüvely között esetlegesen képződött légbuborékot.

Tolja a csontot a tokba.

A csont térfogatának csökkenése esetén csontfedőket, jelentősebb térfogatcsökkenés esetén ALPS Skin Reliever (ENCP) volumen kompenzálót használhat.

A belső csontok tisztítása

Kézzel, semleges szappannal - mint például az Alps PD595 - mossa.

Kiterítve hagyja megszáradni!

Ne használjon fertőtlenítő vagy illatosított szappant!

A belső csontok/térdvédő protézis egész nap érintkezik a bőrrel. A megfelelő higiéniai eljárás érdekében erősen ajánlott az eszköz belső felületét naponta tisztítani és legalább hetente egyszer teljesen lemosni.

Javasoljuk, hogy a páciens két belső csontokkal/térdvédővel lássa el, így amikor az egyiket tisztítja, a másikat hordani tudja.

A csont tisztítása

A csontot minden este, langyos vízzel és pH semleges tisztítószerrel mossa meg (pl. PD595, amelyet kifejezetten érzékeny bőrre terveztek).

Ezután alaposan öblítse le a csontot, hogy a tisztítószer maradványokat eltüntesse, amelyek a későbbiekben bőrirritációt okozhatnak

Egy tiszta ronggyal törölje szárazra a csontot.

Amennyiben a tisztítást reggel végzi, úgy a protézis használata előtt győződjön meg róla, hogy a csont kellően száraz.

Ne használjon petróleum alapú terméket vagy más, olajos alapú síkosítót!

Gyakran feltett kérdések és lehetséges megoldások

Kérdés

Számíthat a páciens arra, hogy a szilikonnal való érintkezés hatására bármilyen negatív reakciót tapasztal?

Válasz

A szilikon előállításának folyamata ennek a belső csontok típusnak az egyik legnagyobb előnye. Nem mérgező és antiallergén tulajdonságai révén bőrbarát, a irritáció igen ritkán fordul elő.

Kérdés

Milyen más előnyei vannak a belső csontoknak?

Válasz

Az Alps szilikon belső csontokjainak felszíne különlegesen sima, amely a tapadási képességét maximálisra növeli, mialatt a piszok visszatartását a minimálisra csökkenti.

Kérdés

Mit javasol a belső csontok viselésének még könnyebbé tételéhez?