

# TERMÉKUTASÍTÁS

HU



## ALPS PROTÉZIS-ZOKNI KCN, KCM, KCW



Az ALPS protézis-zokni könnyű és puha, a kiváló illeszkedéshez párnázást és kényelmet biztosít. A zokni Coolmax-szálakból készül olyan nedvességkezelő rendszer kialakítása céljából, ami elvezeti az izzadságot a testtől a szöveten keresztül, ahol az gyorsan el tud párologni. Alkalmazkodik a térfogat változásaihoz, és viselhető protézissel vagy anélkül.

A vastagság azonosításához színekódolt:




- 1 réteg: Kék
- 3 réteg: Sárga
- 5 réteg: Zöld

## Rendeltetés

Az eszközt alsó végtag lábprotézis részeként való használatra tervezték.

Elsődlegesen protézis-liner fölött használatos, hogy ellensúlyozza a maradék végtagtérfogat változásait; Emellett a bőr további védelmét és párnázását biztosítja, és segít a protézis és a maradék végtag közötti súrlódás csökkentésében.

## Használati és ápolási utasítások

- Viseljen naponta tiszta zoknit
- Kizárólag klórmentes fehérítőt használjon 
- Kifordítva mossa
- Szárítógépben szárítható - finom ciklus, közepes hő 
- Gépi mosás meleg vízben, kímélő mosószerrel 

## Figyelmeztetések

Ne viseljen repedt vagy sérült bőrön

Ne használja tovább, ha az eszközön lyukak vagy állapotromlás jelei mutatkoznak


## Garancia

30 napos elégedettség garancia

A zokni garantáltan mentes gyári hibáktól

## A megfelelő méret kiválasztása

1. Mérje meg a maradék végtag alsó vége és a protézis-tok teteje közötti távolságot. A megfelelő zokni hossza ennél a méretnél kb. 5 cm-rel nagyobb.
2. Mérje meg az „alsó kerületet” 5 cm-rel az alsó vég fölött.
3. Az alábbi táblázat használatával egyeztesse a mért adatokat a megfelelő ALPS protézis-zokni mérettel.

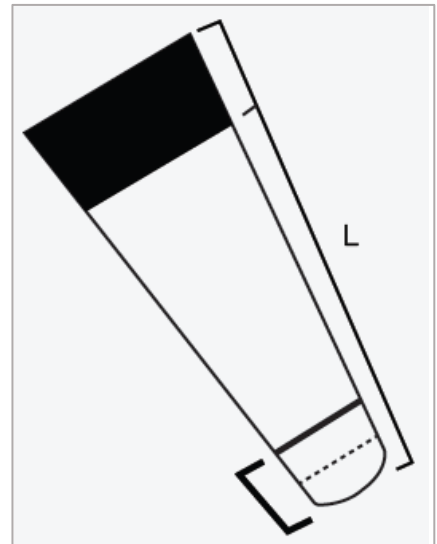

## Méret táblázat

ZOKNIMÉRET	Mért alsó kerület	Tok hossza (min. – max.)	Zokni leírása	Cikkszám
08	20-23 cm	13-18 cm	Keskeny extra rövid	KCN-08-(réteg)(N/H/HR)
10	20-23 cm	18-23 cm	Keskeny rövid	KCN-10-(réteg)(N/H/HR)
14	20-23 cm	23-38 cm	Keskeny normál	KCN-14-(réteg)(N/H/HR)
18	20-23 cm	38-48 cm	Keskeny hosszú	KCN-18-(réteg)(N/H/HR)
08	23-31 cm	13-18 cm	Közepes extra rövid	KCM-08-(réteg)(N/H/HR)
10	23-31 cm	18-23 cm	Közepes rövid	KCM-10-(réteg)(N/H/HR)
14	23-31 cm	23-38 cm	Közepes normál	KCM-14-(réteg)(N/H/HR)
18	23-31 cm	38-48 cm	Közepes hosszú	KCM-18-(réteg)(N/H/HR)
08	31-36 cm	13-18 cm	Széles extra rövid	KCW-08-(réteg)(N/H/HR)
10	31-36 cm	18-23 cm	Széles rövid	KCW-10-(réteg)(N/H/HR)
14	31-36 cm	23-38 cm	Széles normál	KCW-14-(réteg)(N/H/HR)
18	31-36 cm	38-48 cm	Széles hosszú	KCW-18-(réteg)(N/H/HR)

## Szimbólumok jegyzéke



Egyetlen felhasználó számára készült

## Ártalmatlanítás

Az eszközt és a csomagolást a helyi vagy nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ellenőrizze a helyi és nemzeti környezetvédelmi előírásokat, és azoknak megfelelően ártalmatlanítsa őket.



## EK Megfelelőség

Ez a termék megfelel az EU2017/745 európai rendelet orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeinek. Ez a termék a rendelet VIII. mellékletében leírt besorolási szabályok szerint az I. osztályú eszközök közé került besorolásra.




## Súlyos események jelentése

Abban a valószínűtlen esetben, ha az eszközzel kapcsolatban súlyos esemény lép fel, jelenteni kell a gyártónak és az illetékes nemzeti hatóságnak.



**ALPS South LLC**  
2895 42nd Ave. N  
St. Petersburg, FL 33714,  
USA  
Tel 1-727-528-8566  
Fax 1-727-528-5426  
[info@easyliner.com](mailto:info@easyliner.com)  
[www.easyliner.com](http://www.easyliner.com)

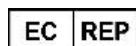

**CEpartner4U**  
Esdoornlaan 13,  
3951DB Maarn,  
The Netherlands  
[www.cepartner4u.com](http://www.cepartner4u.com)



**ALPS CZECH ENGINEERING s.r.o.**  
Božkovské náměstí 17/21  
32600 Plzeň  
Czech Republic  
Tel : +420 377 223 127  
Fax : +420 377 223 010  
[info@easyliner.eu](mailto:info@easyliner.eu)  
[www.easyliner.eu](http://www.easyliner.eu)